

슬라이딩 균형 훈련기 (MSBT-10) 사용설명서

2017.07.21 Ver1.0



<본 제품은 의료기기임>

목 차

I 장 비 소 개

II 구 성 품 및 외 관 설 명

III 주 의 사 항

IV 사 용 방 법

I

장 비 소 개

1. 제품명 : 슬라이딩 균형 훈련기(MSBT-10)

2. 품목명: 수동식기능회복용기구

3. 사용목적

인체의 저하된 기능을 회복하기 위하여 훈련 등에 사용하는 수동식 기구이다.

4. 전원규격

전원 정격	AC 220/230V, 50/60Hz
소비 전력(W)	100W
정격 보호형식 및 보호 정도	2급 기기, B형 장착 부

주의) 전원은 반드시 접지되어야 한다.

주의> 본 장비는 식품의약품안전청으로 부터 허가 받은 제신 17-826호 의료기기이며, 의사의 처방에 따른 치료 및 운동의 목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

II 구성품 및 외관설명

장비 본체



리모컨




다리보조판 거치대



II

구 성 품 및 외관설명

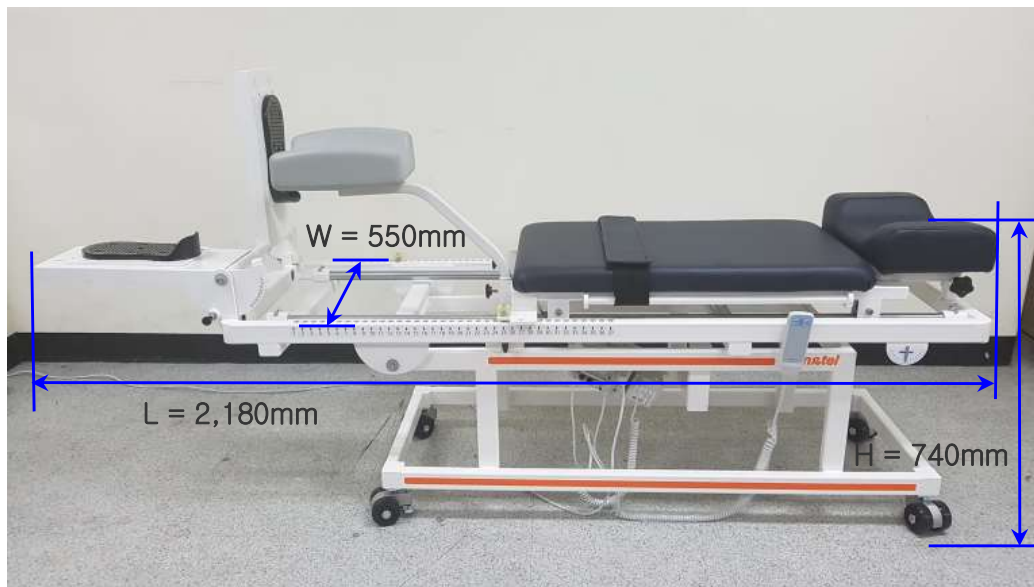

무게 = 110kg

II

구 성 품 및 외관설명



번호	명 칭	기 능
1	머리판 매트	머리 부위를 지지하는 매트
2	등판 매트	등 부위를 지지하는 매트
3	상체 고정벨트	환자가 탑승한 상태에서 상체를 고정하는 기능
4	다리보조판 거치대	하지를 지지하는 거치대 (건축 다리)
5	발판	발의 지지 및 거치
6	등판 고정핀	하지 운동을 위한 등판 범위 조정용 핀(좌우 2EA)
7	하단 고정 레버	하지 운동시 운동 범위를 고정하는 기능
8	각도기	본체의 틸팅된 각도를 알려주는 기능
9	리모컨	테이블 틸팅 각도 조절

1. 본 장비는 의료용 목적으로 제작된 **의료기기**이다.
2. 최초 설치 시 사용자는 설치자에게 기기의 전반적인 **사용법을 교육**받는다.
3. 본 장비는 **습도가 높거나 물기가 있는 장소에서의 사용을 금지**한다.
4. 본 장비 파손 시 제조사나 판매처에 A/S를 요청한다.
5. 사용자 및 사용보조자는 신체나 의복이 **젖은 상태에서 장비 사용을 금지**한다.
6. 본 장비의 임의 **분해나 부적절한 조립을 금지**한다.
7. 본 장비는 정신적인 장애나 음주 등으로 **정상적인 판단이나 치료가 불가능한 자는 사용을 금지**한다.
8. 사용자의 과도한 움직임은 자제하고 **정자세로 천천히 사용**한다.
9. 본 제품은 사용자의 운동 능력, 장애 정도에 따라 필요시 보호자 또는 치료사의 도움을 받아 사용하여야 한다.
10. 제품에 강한 충격이나 무리한 힘을 가하지 말아야 한다.
11. 사용 중 경련, 어지럼 증상을 비롯한 신체적인 이상 징후가 있을 경우에는 즉시 사용을 중지하고 전문가의 상담을 받아야 한다.


IV

사용 방법

- 1) 본체 아래 4개의 바퀴에 붙은 고정나사를 돌려 베드가 흔들리지 않도록 고정시킨다.



- 2) 리모컨 두 개의 버튼으로 베드 틸팅 각도를 조절한다.(0°~40°)

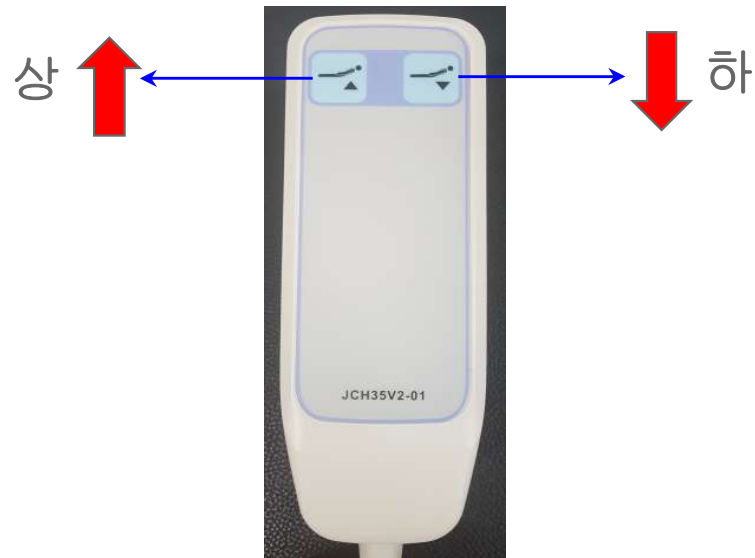

IV

사용 방법

- 3) 환자의 안전을 위해 등판 고정핀이 고정되어 있는지 확인한다.
- 4) 환자의 상태에 따라 환측 다리를 선택하고 다리보조판 거치대를 분리하여 건측 다리에 다리보조 거치대를 고정한다.
- 5) 환자를 눕혀 상체 고정벨트를 신체에 맞게 착용한다.



IV

사용 방법

<하지 근력 훈련 및 균형 훈련>

- 1) 베드 경사각을 조절하여 체중부하 슬라이딩 훈련을 한다.
- 2) 환측 다리 근력 훈련을 한다.(한쪽 다리 훈련)
- 3) 하지 근력 및 균형 훈련을 한다.(양쪽 다리 훈련)
- 4) 베드 경사각도에 따라 훈련 난이도 조절한다.



제 품 보 증 서

- 본 제품의 보상규정은 소비자 피해 보상 규정에 따라 보상합니다.
- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사과정을 거쳐 만든 제품입니다.
보증기간 중 정상적인 사용상태에서 발생한 고장은 당사(제조자) 또는 판매처(대리점)에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 품질 보증기간은 구입일로 부터 1년입니다.
- 다음의 경우에는 보증기간이라도 유상으로 수리합니다.
 - 본 제품의 개조, 사용상의 취급 부주의에 의한 고장
 - 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장
 - 보증서의 제시가 없을 시
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로 부터 3년입니다.

제 품 명		슬라이딩 균형 훈련기	보증기간
모델명		MSBT-10	구입일로 부터 1년
제조번호			
구 입 일		년 월 일	
고 객	성 명		
	주 소		
	전 화		

판 매 처	상 호	
	주 소	
	전 화	